

wellion® CLEVER HbA1c ANALYZER



REINIGUNG UND WARTUNG

MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz, Austria



WT17-38DE RevA
2021-01

Um kontinuierlich genaue Ergebnisse sicherzustellen, sollte der Analyzer regelmäßig gewartet und gereinigt werden.

1. Der Lichtquellenbereich sollte täglich nach Gebrauch gereinigt werden.
2. Reinigen Sie den Analyzer ordnungsgemäß, wenn er verunreinigt ist.

Die routinemäßige Reinigung sollte nach folgender Anleitung durchgeführt werden:

1. Entfernen Sie die Paneele vom Analyzer




Wenn Puffer Rückstände in der Puffer Öffnung sind, entfernen Sie diese mit Hilfe eines Wattestäbchens bevor Sie den Teststreifen entfernen.




Schalten Sie den Analyzer aus und klappen Sie die Puffer-Kit Halterung nach oben. Dann entfernen Sie das kleine und das große Panel vom Analyzer.

2. Reinigen Sie die Panel-Oberflächen und den Lichtquellen-Bereich

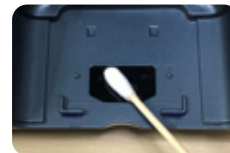

Reinigen Sie die Oberfläche der Paneele und den Lichtquellen-Bereich mit einem mit destilliertem Wasser getränktem Wattestäbchen. Verwenden Sie bei Bedarf 75%igen medizinischen Alkohol.

3. Reinigen Sie die Paneele gründlich

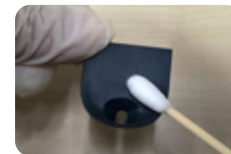

Wenn der Puffer in den Zwischenraum des großen und kleinen Panels gelangt, entfernen Sie das kleine vom großen Panel und reinigen Sie beide gründlich.

Hinweis:

- A. Verwenden Sie zum Reinigen keine organischen Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner) oder andere Lösungsmittel, welche chemische Schäden am Analyzer verursachen können.
- B. Zum Reinigen tränken Sie den Analyzer nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.